



検査を受ける前に
必ずこのシートを
ご一読ください。

N-NOSE[®] plus すい臓

エヌノーズ

N-NOSE検査の流れ 検査のお申込みにはN-NOSE検査に関する説明書へのご同意、ご署名が必要になります。

STEP
1

まずは、以下にあてはまる項目がないかチェック。

以下の場合、検査結果に影響を及ぼす可能性がありますので、**採尿を避け**、別の日に改めて採尿してください。

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 体調不良・ 疲労が激しい | 妊娠中 | 生理中・血尿や 潜血が疑われる | 感染症に 罹患 | アルコール の摂取 | 睡眠不足 |
| | | | | | |

STEP
2

上記にあてはまる項目がなければ、**こちらの手順で採尿を行ってください。**
朝食前もしくは昼食前の空腹時(食後4時間以上)に採尿してください。

※お水以外の摂取はお控えください。

| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| キット内容を確認 | 必要事項を記入 | 中間尿を採尿 | 容器は8分目まで |
| 検体提出袋 スポイト 検体容器 採尿カップ 『N-NOSE [®] 』 説明文書 | 必要事項を記入 必要事項を記入 検体提出袋と『N-NOSE [®] 』説明文書に必要事項を記入してください。 | 出始めと終わりはとらず、途中の尿を採尿してください。 | この位置を目安に尿をお入れください 尿採取は容器を満杯にせず、8分目に止めてください。 |

STEP
3

検体提出から、6～8週間後に
(株)HIROTSUバイオサイエンスより郵送いたします。

裏面の注意事項も必ずご確認ください。



判定結果については、下記の点にご注意ください。

がんを診断する 検査では ありません。

N-NOSEは、これまでの臨床研究をもとに検査時のがんのリスクを評価するもので、がんを診断する検査ではありません。そのため、今回の検査で、「がんのリスクが検出されなかった方」でも、がんに罹患していないとは言い切れません。また、「がんのリスクが高いと判定された方」でも、必ずしもがんに罹患していることを示すものではありません。




がんの進行具合は 評価できません。

N-NOSE plus すい臓は、現時点において、**がんの進行具合について・評価することはできません。**



検査料金は 自己負担です。

N-NOSEの検査料金は、**健康保険適用外で自己負担**となります。

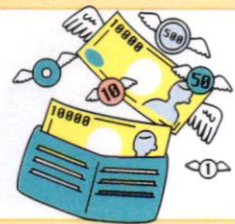

健康状態で気になることがあれば、 医療機関へ。

健康状態で気になる点がある場合は、検査の結果に関わらず、**かかりつけ医またはお近くの医療機関へのご相談をお勧めします。**



① N-NOSEとは…

どんな検査？

N-NOSEは、線虫の嗅覚を利用したがんリスク検査です。この検査は、線虫ががん患者の尿に対して誘引行動を、健常者の尿に対しては忌避行動をとるという特性を応用します。

メリットは？

線虫の優れた嗅覚を匂いセンサーとして利用しているため、機械では検知できない早期がんにも反応することが期待されます。

どう判定する？

N-NOSEの判定は、尿検体に対する線虫の走性行動を解析し独自のアルゴリズムで算出します。

Q&Aよくあるご質問
当社N-NOSEのサイトをご確認ください。
<https://faq.n-nose.com/>



株式会社HIROTSUバイオサイエンス
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンコート22階

