



検査を受ける前に
必ずこのシートを
ご一読ください。

N-NOSE[®]

エヌノーズ

N-NOSE検査の流れ 検査のお申込みにはN-NOSE検査に関する説明書へのご同意、ご署名が必要になります。

STEP
1

まずは、以下にあてはまる項目がないかチェック。

以下の場合、検査結果に影響を及ぼす可能性がありますので、
採尿を避け、別の日に改めて採尿してください。




STEP
2

上記にあてはまる項目がなければ、**こちらの手順で採尿を行ってください。**

朝食前もしくは昼食前の空腹時(食後4時間以上)に採尿してください。

※採尿前の水分摂取はお控えください。

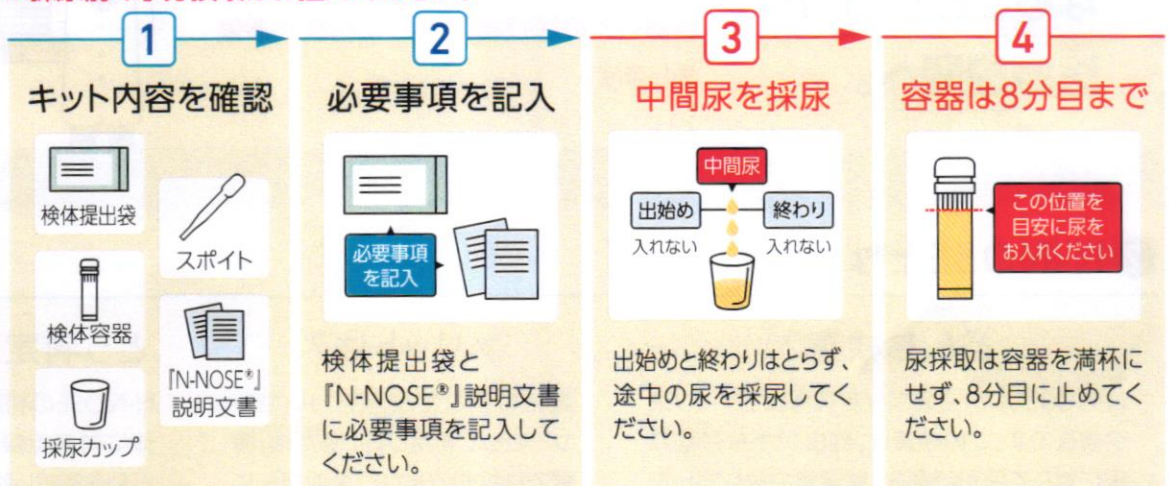

STEP
3

検体提出から、4～6週間後に
(株)HIROTSUバイオサイエンスより郵送いたします。

裏面の注意事項も必ずご確認ください。

! 判定結果については、下記の点にご注意ください。

がんを診断する検査ではありません。

N-NOSEは、これまでの臨床研究をもとに検査時のがんのリスクを評価するもので、がんを診断する検査ではありません。そのため、今回の検査で、「がんのリスクが検出されなかった方」でも、がんに罹患していないとは言い切れません。また、「がんのリスクが高いと判定された方」でも、必ずしもがんに罹患していることを示すものではありません。




がんの進行具合は評価できません。

N-NOSEはがんの進行具合について・評価することはできません。



検査料金は自己負担です。

N-NOSEの検査料金は、健康保険適用外で自己負担となります。

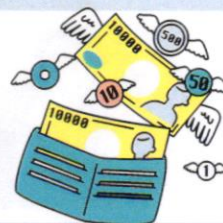

健康状態で気になることがあれば、医療機関へ。

健康状態で気になる点がある場合は、検査の結果に関わらず、かかりつけ医またはお近くの医療機関へのご相談をお勧めします。



? N-NOSEとは…

どんな検査?

N-NOSEは、線虫の嗅覚を利用したがんリスク検査です。この検査は、線虫ががん患者の尿に対して誘引行動を、健常者の尿に対しては忌避行動をとるという特性を応用します。

メリットは?

線虫の優れた嗅覚を匂いセンサーとして利用しているため、機械では検知できない早期がんにも反応することが期待されます。

どう判定する?

N-NOSEの判定は、尿検体に対する線虫の走性行動を解析し独自のアルゴリズムで算出します。

Q&Aよくあるご質問
当社N-NOSEのサイトをご確認ください。
<https://faq.n-nose.com/>



株式会社HIROTSUバイオサイエンス
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンコート22階

